

**ISTRUZIONI PER LA CORRETTA RACCOLTA ED INVIO DEI CAMPIONI CON  
RICHIESTA DI FATTORI DELLA COAGULAZIONE**

**1. Raccolta del campione**

- a. Controllare il corretto riempimento della provetta con sodio citrato (provetta tappo azzurro) fino alla linea gofrata;
- b. Assicurarsi che la quantità raccolta sia sufficiente per la determinazione del numero di fattori richiesti. In particolare sono necessari almeno 500 µL di plasma per ciascun fattore richiesto (generalmente, sulla base dell'ematocrito, da 3 mL di sangue intero si ottengono circa 1500 µL di plasma).

**2. Invio dei Campioni**

- a. Accertarsi che, nel caso di invio di campioni freschi, questi arrivino entro le 6 ore dal prelievo a temperatura ambiente;
- b. Accertarsi che, nel caso di invio di aliquote di plasma congelato (-20 °C), queste siano trasportate in ghiaccio e sia inviato un numero sufficiente di aliquote per la determinazione dei Fattori richiesti.

**3. Documenti in allegato**

- a. Compilare ed inviare con il campione la Scheda Informativa Diatesi Trombotiche ed Emorragiche per favorire la corretta interpretazione del risultato.