

Indicazioni per richiesta di FATTORI DELLA COAGULAZIONE

Nel caso di richiesta di determinazione di Fattori della Coagulazione si chiede

1. di controllare il corretto riempimento della provetta con sodio citrato (tappo azzurro) fino alla linea gofrata
2. di inviare una aliquota di **almeno 500 microLitri di plasma per ciascuno fattore richiesto** (da 1 provetta da 3 mL di sangue intero si ottengono circa 1500 microLitri di plasma, a seconda dell'ematocrito)
3. di assicurarsi che, *nel caso di invio di aliquote congelate a -20°C (trasporto in ghiaccio)*, sia inviato un **numero di aliquote** adeguato.
4. di accertarsi che, *nel caso di invio di campioni freschi* arrivino entro 6 ore dal prelievo a temperatura ambiente.
5. di compilare e inviare con il campione la Scheda informativa Diatesi Trombotiche ed Emorragiche per favorire la corretta interpretazione del risultato.